

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr geht dem Ende entgegen und wie immer zu dieser Zeit machen wir uns Gedanken, wie es im nächsten Jahr weitergeht und welche **sinnvollen Investitionen** wir planen können. Sicher haben Sie schon einmal an die Anschaffung eines **Lasernadelakupunktur- oder Laserblutbestrahlungsgerätes** gedacht, sind dann aber vielleicht vor den Investitionskosten zurückgeschreckt.

Es gibt einige wichtige Gründe, jetzt erneut an eine solche Investition zu denken:

1. Glücklicherweise sind durch den politischen Wandel unsere Arbeitsbedingungen verbessert worden, insbesondere hat sich die Honorarsituation der meisten Kollegen verbessert.
2. Webermedical bietet als erstes Unternehmen im Bereich der Lasertechnik eine **Finanzierung zum Nulltarif**. Das heißt, Sie können 36 Monate bequem ihre Teilraten abtragen und zahlen keinen Cent drauf. Das Gerät gehört vom ersten Tag an Ihnen.

Die Anschaffung eines weberneedle Blutbestrahlungsgerätes lohnt immer: Bei einer Nulltariffinanzierung eines Gerätes mit rotem und grünem Laser hätten Sie z.B. eine monatliche Belastung von **215,49 €** (inkl. MwSt., bei einer Laufzeit von 36 Monaten).  
***Somit würden Sie bereits mit einem Patienten pro Monat (bei einer Serie von 10 Behandlungen) in die Gewinnzone kommen!***

Sie werden vielleicht schon lange mit unserem weberneedle-Akupunkturgerät geliebäugelt haben. Sie werden vielleicht gedacht haben: Akupunktur kann ich auch mit Nadeln machen.

Aber: Die neueste und gerade in „Medical Acupuncture“ veröffentlichte Studie aus der Mayo-Klinik in den USA hat gezeigt, dass die **Lasernadel im Vergleich zur Metallnadel eine fast doppelt so gute Wirkung** bei chronischen Knie-, Schulter- und Rückenschmerzen hatte.

Bei einer Nulltariffinanzierung eines 10-kanaligen Lasernadelakupunkturgerätes mit 5 roten und 5 infraroten Lasernadeln hätten Sie z.B. eine monatliche Belastung von **450,55 €** (inkl. MwSt., bei einer Laufzeit von 36 Monaten).  
***Somit würden Sie bereits mit zwei Patienten pro Monat (bei einer Serie von 10 Behandlungen) in die Gewinnzone kommen!***

Und: Sie können mit diesem Gerät noch viel mehr für die tägliche Praxis und für bisher therapieresistente Patienten anfangen:

### **Die interstitielle Lasertherapie oder interstitielle Akupunktur.**

Was bedeutet das?

Wir infiltrieren den Bezirk mit einem Lokalanästhetikum, z.B. 5 ml Scandicain. Wir legen eine Kanüle in die Nähe des Schmerzherdes (Diskusprolaps oder Spinalstenose) und bestrahlen den Bezirk in der Tiefe des Gewebes mit einem sterilen Katheter, den wir in die Nadel einführen.

Damit wird die Laserleistung am Herd vervielfacht und die Ergebnisse sind wesentlich rascher und zuverlässiger. Mit der gleichen Technologie können Sie perkutan-interstitiell Beschwerden grundsätzlich überall behandeln (alle Gelenke).

Sie können sogar intraartikulär (z.B. Knie nach Hyaluronsäureinjektion) erfolgreich therapieren.



### **Was gibt es noch Neues?**

Die **abdominelle Mikrosystemakupunktur** nach Dr. Grandjean ist eine einfache und hocheffektive neue Methode zur Behandlung chronischer Schmerzen und Störfelder. Dabei wird mittels Lasertechnik das Somatotop auf den Bauch projiziert und so die Punkteauswahl und –auffindung erheblich erleichtert.

Alles dies sind sensationelle Neuerungen der Lasertherapie, entwickelt von Dr. Weber selbst und vielen seiner Kollegen und Referenten.


Wenn Sie mehr erfahren wollen, bevor Sie sich entscheiden:

Rufen Sie uns an und lassen sich informieren.  
Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.  
Besuchen Sie uns in unseren Behandlungszentren.

Besuchen Sie unser **letztes EGLA Seminar** in diesem Jahr in Göttingen mit den Topics:

1. Die intravenöse Lasertherapie zur (legalen) Leistungssteigerung in der Sportmedizin
2. Die interstitielle Lasertherapie und –akupunktur: Eine neue therapeutische Option chronischer Schmerzen und Arthrosen
3. Die neue abdominelle Mikrosystemakupunktur nach Grandjean: Einfach erlernbar und hocheffektiv bei chronischen Krankheitsbildern

Mit herzlichen kollegialen Grüßen,

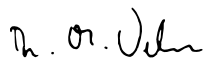

Dr. med. Dipl. Chem. M. Weber

**Jetzt mit  
Online-Shop**



**weber**  
medical



### *Moderne Lasersysteme in der Medizin:*

*Bis zu 12 Laser (rot, infrarot, grün, blau) zur simultanen Anwendung:*

- Lasernadelakupunktur
- Intravenöse Laserblutbestrahlung
- Zahnbehandlung

- Dermatologische Lasertherapie
- Kosmetische Lasertherapie
- Photodynamische Therapie



#### **Weberneedle Blood (rot/grün):**

Monatliche Rate inkl. MwSt. 215,49 €\*  
—> bei einem Patienten pro Monat in der Gewinnzone

#### **Weberneedle Basic/Compact (5 rot/ 5 infrarot):**

Monatliche Rate inkl. MwSt. 450,55 €\*  
—> bei zwei Patienten pro Monat in der Gewinnzone

\* Laufzeit 36 Monate



#### EGLA Seminar am 11.12.10:

- Leistungssteigerung mittels Laserblutbestrahlung - Interstitielle Lasertherapie -
- Neue abdominelle Mikrosystemakupunktur -

