


Protokoll für photodynamische und kosmetische Therapie

Die Therapie besteht aus 2 Schritten:

1. Einer photodynamischen Therapie, welche bis zu dreimal durchgeführt werden kann (einmal pro Monat)
2. Einer kosmetischen Behandlung mit Hyaluronsäure einmal pro Woche

1. Schritt: Photodynamische Behandlung


1. Reiben Sie eine dünne Schicht der 20% 5-ALA Crème auf eine 2 cm² Fläche unterhalb des Ohres
2. Warten Sie 3 ½ Stunden
3. Bestrahlen Sie 10 Minuten mit der Weberneedle Munddusche mit 2 roten (50 mW), einem grünen (5 mW) und einem blauen Laser (5 mW)
4. Warten Sie bis zum nächsten Tag, die behandelte Haut sollte gerötet sein. Ist die Reaktion eingetreten (rote Haut), tragen Sie die 5-ALA Crème in einer dünnen Schicht auf das komplette Gesicht auf (außer der Fläche des Vortags)
5. Bestrahlen Sie wie unter Schritt 3 das ganze Gesicht nach 3 1/2 Stunden
6. Schauen Sie an den folgenden Tagen, ob die Reaktion okay ist (gerötetes Gesicht für 3 Tage, danach Abschuppung der oberen Hautschicht). In dieser Zeit kann die Weberneedle Daycreme für die Hautpflege verwendet werden

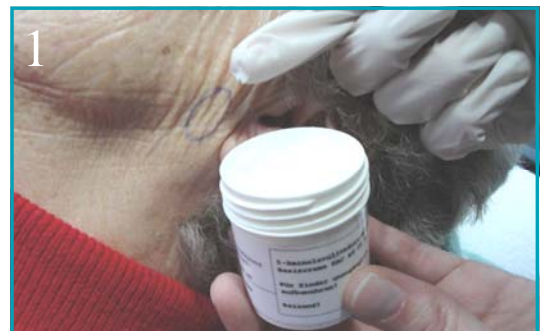

2. Schritt: Kosmetische Behandlung

Nach einer Woche wird mit der kosmetischen Lasertherapie begonnen.

1. Reiben Sie das pure Hyaluronsäuregel auf das komplette Gesicht
2. 10 Minuten später reiben Sie die Weberneedle Beauty Crème auf das komplette Gesicht
3. Behandeln Sie das Gesicht mit dem Ultraschallgerät
4. Behandeln Sie die Areale um den Mund, die Nase und die Augen mit der Munddusche (2 infrarote, 1 roter, 1 grüner und ein blauer Laser) für 10 Minuten
5. Behandeln Sie das komplette Gesicht mit der Körperdusche mit 5 infraroten, 5 roten, einem grünen und einem blauen Laser für 10 Minuten
6. Die Haut kann nach 3 Stunden gewaschen werden

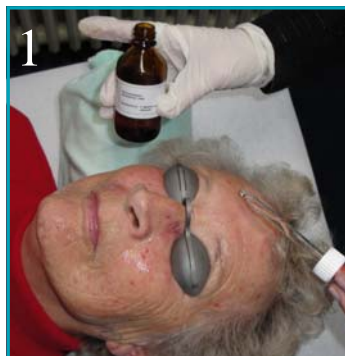

3. Schritt: Selbstbehandlung

Für den Gebrauch zu Hause, stellen Sie den Patienten mit der Weberneedle Tages- und Nachtcrème zur täglichen Selbstbehandlung aus.

